

Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

SERINGA 100104A



Descrição: Material compatível com injetora de meios de contraste (MC) e solução fisiológica (SF). Seringa de 200mL em PVC atóxico transparente, livre de DEHP, livre látex. Composto pelos acessórios: tubo extensor espiralado de uma via (150cm) e tubo J de enchimento rápido. Produto Estéril e Apirógeno.

Indicação: Produto destinado para administração de MC e/ou SF. Compatível com injetora IMEX C20/C22.

Modo de Uso: Com meios assépticos, abrir a embalagem e manusear o material adequadamente, para minimizar o risco de contaminação.

Instalação da seringa: Certifique-se de que o pistão da injetora esteja completamente retraído.

Retire a seringa da embalagem, conecte corretamente na injetora, até o travamento completo. Certifique-se de que a seringa esteja conectada corretamente na injetora.

Preenchimento da Seringa: Avance o êmbolo para cima. Remova a tampa e conecte o extensor de aspiração e injeção de contraste. Aspire o meio de contraste pelo conector de aspiração, até encher a seringa. Retire o ar do extensor por completo. Incline as seringas da injetora para baixo, para iniciar o exame.

Cuidados e Advertências: Inspeccionar visualmente as condições da embalagem, se estiver violada, não utilizar. Inspeccionar o conteúdo antes da utilização. Não conecte o extensor no paciente, até que todo o ar tenha sido retirado da seringa e do extensor. Siga sempre técnica asséptica, durante todo o manuseio dos materiais. A esterilidade da seringa será comprometida se o êmbolo for retirado da mesma. Não remova o êmbolo para preencher a seringa. Certifique, se a seringa está acoplada corretamente na injetora e cheque se o pistão e êmbolo estão encaixados devidamente. Se houver acoplamento inadequado poderá ocorrer deslocamento do êmbolo e vazamento de MC e/ou SF na injetora, ocasionando assim danos na injetora.

Contraindicação: Este produto não é destinado a infusão de outros fármacos, quimioterápicos ou qualquer outro uso para o qual o produto não está indicado.

Armazenamento: Temperatura entre -18°C a 50°C em local fresco e seco.

Descarte: O produto deve ser descartado em recipiente apropriado, de acordo com procedimentos padronizados pelas clínicas e/ou hospitais. Considerando se o lixo é infectante e/ou químico.

Precauções: Podem ocorrer danos aos componentes se não for instalado corretamente. Assegure-se de que todas as conexões estejam seguras, não aperte demais, para que não haja danos nos componentes. Atentar-se ao prazo de validade das embalagens.

Legenda dos símbolos presentes na embalagem:



Consulte as instruções de uso



Não pirogênico



Não reutilizar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada consultar as instruções de uso



Sistema de barreira feito com Estireno-Butadieno-Estireno



Dispositivo Médico



Livre de DEHP



Livre de latex



Esterilizado com óxido de etileno



Limite de temperatura (-18°/50°)



Data de fabricação



Data de validade



Código do lote